

BASIC BRAILLE PLUS

DISPLAY BRAILLE A 40 CARATTERI CON TASTIERA DATTILOBRAILLE

DESCRIZIONE

Basic Braille Plus Help Tech è un display Braille a 40 caratteri portatile dotato di una tastiera dattilobrasile che permette la scrittura di testi. Può essere utilizzato sia con Personal Computer Windows e Mac, che con Smartphone iPhone e Android, essendo provvisto di collegamenti USB e Bluetooth.

E' stato progettato e realizzato in Germania con i più alti standard qualitativi, e con un'attenzione particolare alla durata sia delle celle Braille che dei punti Braille. Il corpo del Basic Braille Plus è realizzato in un elegante alluminio anodizzato blu e le sue dimensioni compatte ne consentono un comodo posizionamento di fronte al computer o al notebook. Il suo utilizzo è semplice in quanto ci sono solo tre tasti sul lato destro e altri tre sul lato sinistro delle celle Braille, con i quali muoversi in avanti e indietro nel testo. Mentre si usa una mano per navigare, si può usare l'altra per leggere sulla barra Braille. I tasti di routing del cursore sono integrati nelle celle Braille e possono essere usati per posizionare il cursore nel punto desiderato all'interno del testo.

La tastiera dattilobrasile è composta da 8 tasti più barra spazio, ed è realizzata in modo ergonomico così da permettere un veloce input di testi su smartphone e PC, oltre a un comodo controllo delle loro funzioni.

Basic Braille Plus non ha una sua memoria a bordo perché è pensato per funzionare assieme a uno smartphone o a un PC, su cui risiedono tutti i programmi di uso comune. Infatti si interfaccia in Bluetooth in modo istantaneo e funziona con tutti i lettori di schermo più diffusi, come Hal/Supernova, JAWS, NVDA e Windows Eyes, oppure Voice Over su dispositivi Apple e TalkBack/BrailleBack su dispositivi Android. Non richiede di installare driver speciali quando viene collegato a un PC, in quanto usa la tecnologia HID (Human Interface Device).

Inoltre, grazie alla speciale penna USB StartStick fornita a corredo, che contiene una versione del programma NVDA già preconfigurato per funzionare con Basic Braille Plus, è possibile utilizzarlo fuori casa su qualunque PC, anche se non dotato di un programma di lettura dello schermo.

Basic Braille Plus si può collegare al computer anche tramite un normale cavo USB attraverso il quale ricarica la batteria interna, e non necessita quindi di un alimentatore separato. E' infatti dotato di una batteria agli ioni di litio che consente un'autonomia di circa 12 ore quando lo si utilizza con il collegamento senza fili Bluetooth.

Basic Braille Plus viene fornito con una pratica e robusta borsa per il trasporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display Braille con 40 celle piezoelettriche piane e 40 tasti di routing del cursore.
- Tastiera dattilobrasile ergonomica con 8 tasti più barra spazio per l'input di testo
- 6 tasti funzione (3 sul lato destro e 3 sul lato sinistro dell'apparecchio).
- Collegamento al PC o smartphone tramite porta USB o connessione Bluetooth .
- Batteria agli ioni di litio; autonomia 12 ore; tempo di ricarica: 3 ore; ricarica attraverso la porta USB
- Corpo in alluminio blu anodizzato.
- Supporto degli screen reader Jaws, Hal, Supernova, Window-Eyes, NVDA, Voice Over, TalkBack/BrailleBack
- Dimensioni: 347 x 91,5 x 19,5 mm; Peso: 790 g.
- Dotazione a corredo: borsa per il trasporto, alimentatore per ricaricare la batteria interna, cavo USB per il collegamento al PC, penna USB StartStick per l'uso immediato su qualunque PC.

AUDIOLOGIC

Via N. Tommaseo, 94 - 35131 PADOVA ITALY - Tel. 049-8074811 - Fax 049-8074810
web: www.audiologic.it - e-mail: info@audiologic.it
